


EMOFIX SERBIA

Nome:	EMOFIX SERBIA
Codice:	SR030UFG
Tipo Carta:	VALPRINT USOMANO 60gr/mq bianco
F.to carta:	150x200 mm.
Piega:	SI verticale finito 25 mm
Stampa:	1 colore NERO

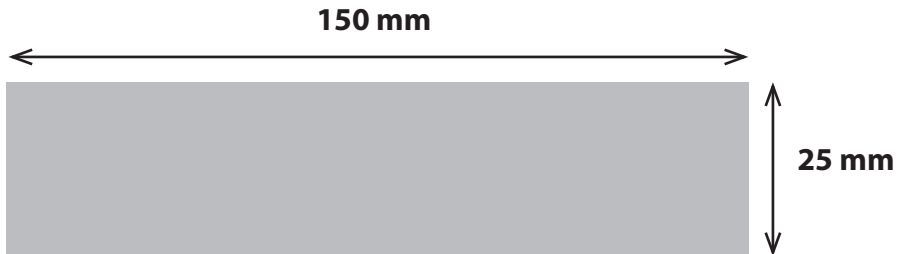

4 bozza
del
19-07-2010



Mast za zaustavljanje krvarenja

Indikacije:

Medicinsko sredstvo sa mehaničkim dejstvom, koje se koristi za sprečavanje ponovnih hemoragičnih stanja na koži i sluzokoži, kao što su krvarenje iz nosa (epistaxis), esencijalno krvarenje (kada se ne zna uzrok) ili posle trauma, krvarenje iz desni, itd.

Sastav:

Mešavina zasićenih masnih kiselina, proteinski ekstrakt kvasca (biljni kolagen), fosfatidil holin, tokoferil acetat, pčelinji vosak, ulje soje, stearyl alkohol, kalcijum hlorid, kalijum i magnezijum, gliceril monostearat, metil i propil parahidroksibenzoat, BHT.

Način upotrebe:

Naneti određenu količinu proizvoda dovoljnu da pokrije željeni deo. U slučaju nazalne upotrebe, preporučuje se da se mast nanosi odgovarajućim sredstvom.

Neželjeni efekti:

Nema neželjenih efekata.

Upozorenje:

Čuvati na temperaturi od 18°C do 25°C. Na niskim temperaturama proizvod se može zgusnuti, dok na visokim temperaturama može postati vrlo tečan. Takve promene ne utiču na kvalitet proizvoda. Da biste ga doveli u originalno stanje, jednostavno ga držite na sobnoj temperaturi (ne nižoj od 18°C).

Nemojte koristiti proizvod u slučaju preosetljivosti na bilo koju komponentu.

Ukoliko se pojave neželjene reakcije, prekinite korišćenje i konsultujte lekara.

Nakon upotrebe dobro zatvorite tubu.

Nemojte koristiti proizvod nakon isteka roka upotrebe.

Čuvati van domašaja dece.

Proizvođač: DMG Italia Srl

Via Laurentina, km 26.700 – 00040 Pomezia, Rome – Italy

Nosilac dozvole: Sibex Line doo Beograd

Dobropoljska 15

11040 Beograd

Republika Srbija

